



Trocken-Max Pferdefön
www.trocken-max.com



Was ist Trocken-Max ?

Der **TROCKEN-MAX** ist ein wirkungsvolles, jahrelang erprobtes System, das gerade die Profi-Fachwelt, mit ständig einsatzbereiten und gesund zu erhaltenden Pferden, überzeugte. Der **TROCKEN-MAX** ermöglicht schweißtreibendes Wintertraining und verhindert Erkältungen und Nierenkoliken. Er ist tierärztlich getestet und für sehr fortschrittlich befunden worden und ist nun schon mehr als 20 Jahre erfolgreiche im Einsatz im Bereich: Western, Military, Springen, Dressur, Renn- und Fahrsport sowie in Pferdekliniken mit besten Referenzen!



Der **TROCKEN-MAX** besteht aus einer zweiwandigen, extrem leichten Decke aus Fallschirmseide für das Pferd, die auf der Innenseite kleine, regelmäßig angeordnete Löcher besitzt, und einem Warmluftgebläse mit einem Verbindungsschlauch. Die Luft, nur um wenige Grade wärmer als die Körpertemperatur, bläst die leichte Decke auf und bildet gleichzeitig einen Luftraum zwischen Pferd und Decke. Durch die gleichmäßig verteilten Luftaustrittsöffnungen gelangen die Luftströme an alle Körperteile und trockenen diese sehr schnell.

Wie funktioniert der Trocken-Max ?

TROCKEN-MAX trocknet Ihr Pferd mit einem schwebenden Warmluftumhang, schonend und gleichmäßig an **allen** wichtigen Körperpartien, Und das in rund 10 bis 15 Minuten!



Michael Schmid
Rembserhof
56237 Alsbach

Telefon: 02623/92 76 910

Mobil: 0171/235 24 30

www.kimranch.de



Das Herz des **TROCKEN-MAX** ist ein geräuscharmes Gebläse. Hier werden die Warmluftströme erzeugt, die durch einen 300 cm langen, trittfesten Schlauch zum Bauchteil der Trockendecke geblasen werden. Die Decke ist konstruiert wie eine Trockenschwebhaube. Sie besteht aus einem speziell strapazierfähigen und leichten Material. Die warme Luft strömt gleichmäßig entlang der Bauch-, Brust- und Rückenpartien. Durch den Druck schwebt die Decke leicht über dem Pferdekörper und passt sich so automatisch an den Proportionen an.

Wie verwendet man den Trocken-Max ?

TROCKEN-MAX übertrifft alle herkömmlichen Trocknungsmethoden! **Die einfache und unkomplizierte Handhabung:**

- Decke auffalten und dem Pferd mit den Klettverschlüssen nach außen, locker auflegen.
- Den Luftabzweiger am Schlauchende mit den Lufteinlaßkanälen am Bauchteil der Decke verbinden.
- Das Gebläse einschalten und kurz abwarten bis sich die Decke durch den Luftdruck dem jeweiligen Pferdekörper anpasst.
- Jetzt die Klettverschlüsse an Bauch und Brust locker verschließen.
- Nach rund 15 Minuten, je nach Fell, ist das Pferd trocken.

Übrigens: Auch nervöse Pferde sind schnell an die angenehme Trocknung zu gewöhnen.

Welches Zubehör ist erhältlich ?

Grundsätzlich gibt es alles einzeln zu bestellen. Gebläse, Verbindungsschlauch und die Decke.

Desweiteren gibt es auch einen Ersatzfilter – ein regelmäßiges Reinigen sowie ein Austausch alle 5 Jahre verlängert die Lebensdauer Ihres Trocken-Max Pferdefans.

Decken sind mittlerweile in unterschiedlichen Farben erhältlich. Desweiteren können wir auch Logos auf die Decke drucken. Zum Schutz des Systems bieten wir einen Systemkoffer an.



Michael Schmid

Rembserhof
56237 Alsbach

Telefon: 02623/92 76 910

Mobil: 0171/235 24 30

www.kimranch.de



**Bestellformular ausdrucken und
per eMail an schmidmi@yahoo.de oder
per Fax an 02623/9293563**

Alle Felder müssen ausgefüllt werden!

Name:

Vorname:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Land:

Telefon:

E-Mail Adresse:

In welcher Größe
benötigen Sie den
TROCKEN-MAX?

TROCKEN-MAX Gr. I 178 – 185 cm

TROCKEN-MAX Gr. II 145 – 177 cm

TROCKEN-MAX Gr. III 120 – 144 cm

TROCKEN-MAX Gr. W 146 -172 cm (mit integr. Halsteil)

zum Preis von 899.- € per Überweisung im voraus (zuzügl. Versand)

Sie bekommen von uns eine Bestätigung Ihrer Bestellung und unsere Kontoverbindungsdaten per Post/eMail zugestellt.

Michael Schmid
Rembserhof
56237 Alsbach

Telefon: 02623/92 76 910

Mobil: 0171/235 24 30

www.kimranch.de